


# どんな所でも 検査できる 抗原検査キット

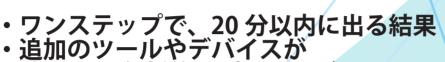

必要ない包括的なパッケージ!

## 他の検査方法とのパフォーマンスの比較

COND '68

COVID-19 Ag

COVID-19 Ag の場合		コンパレータ (RT-PCR)		<b>△=</b> 1
		陽性(+)	陰性 (一)	合計
SGTI-flex COVID-19 Ag	陽性(+)	136	1	137
	陰性 (一)	7	99	106
合計		143	100	243

- 臨床的感度 = 95.10% (136/143, 95% CI: 90.24%~97.61%)
- 臨床的特異性 = 99.00% (99/100, 95% CI: 94.55~99.82%)
- 一致度 = 96.71% (235/243, 95% CI: 93.64%~98.32%)

### 仕様

方法	免疫クロマトグラフィー	
梱包単位	25 テスト/キット	
認証	CE-IVD	
検体	鼻腔頭又は咽頭スワブ	
LOD	5.3 x 102 TCID50/mL	
実行時間	20分	

	ホイル袋の検査デバイス(個別)		
提供される	滴下ビンの油出液		
	標本展開フィルターキャップ		
材料	検体採取用の滅菌綿棒		
	取扱説明書		
使用期限	18ヶ月		
保存条件	2~30℃以下直射日光・高温多湿を避ける		







### COVID-19 Ag






CAGT025E0

### キットの構成



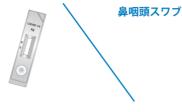





### 検査の準備

1 抽出バッファーチューブを開き、 紙製の管立てに入れます。



**2** カセットのポーチを開き、 平らな面に置きます。



まんべんなく 擦る

#### ↑ テストの直前に検体を採取してください!

- 身腔頭又は咽頭スワブを患者の鼻孔に慎重に挿入します。 線棒は、鼻孔から耳の外側の開口部までの距離に等しい深さに 達する必要があります
- 線棒をそっとこすって転がします。分泌物を吸収するために、 線棒を数秒間そのままにしておきます。そして、回転させながらゆっくりと綿棒を取り出します。
- 3 綿棒を抽出バッファーチューブに挿入し ます。そして綿棒を5回以上かき混ぜます。



チューブの側面を押して絞って、 スワブから 残りの液体を抽出し、 スワブを取り出しま す。




滴下キャップをチューブに押し付けます。



抽出バッファーチューブを逆さにします。検査カセットのサンプルウェルに処理済みのサンプルを3滴入れます。



7 20 ~ 30 分以内に結果を読みます。 結果は 30 分後に無効になります。 ※ 30 分後に読まないでください。

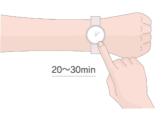

8 結果の解釈





